

## 智能手杖

产品型号：LT-1003

产品尺寸：700\*157\*38mm ， 重量：300 克

工作原理：

本品采用优质收音集成电路，高灵敏度 FM 调频收音机，随时随地捕捉每个精彩电波。产品提供标准 USB 5V 输入给内置软包装锂电池充电储能，驱动 LED 照明，闪光，蜂鸣器高分贝声音报警。

产品功能：

1. 高灵敏度 FM 调频收音机；
2. LED 手电筒照明，闪光警示；
3. 超过 100 分贝声音报警；
4. 通过标准 5V USB 线可以给内置充电电池进行充电；
5. 灯头可 45° 角旋转，提供远光，近光照明；
6. 产品防溅水设计，外形美观；
7. 产品配带挂绳，方便携带及挂放；
8. 高强度可伸缩调节铝合金杆。

技术参数

### 1. 收音

FM 调频灵敏度	优于 10uV
FM 调频频率接收范围	76—108MHz
音频输出功率	大于 100mW
电池充满电收音机工作时间	大于 6 小时

### 2. 照明，报警

四颗高亮 $\varnothing 5$ 白发白 LED 灯光通量	$\geq 20\text{lm}$
电池满电 LED 照明时间	$\geq 12$ 小时
电池满电 LED 照明+闪光时间	$\geq 6$ 小时
电池满电 LED 闪光警示+喇叭报警时间	$\geq 6$ 小时

### 3. 充电

输入电压	5—5.3V
充电线	标准 USB 公头+DC 插头 $\varnothing 3.5 * \varnothing 1.1$
标准 5V 输出 USB 线给内置电池充满电时间	约 3 小时

使用方法：

#### 1. 调节铝合金杆高度

用手压下铝合金杆上的按钮，上下移动较细的铝合金底杆，将按钮扣入到较粗铝合金杆对应的孔位中，以满足不同身高人群的使用需求。高度调节好了后，将锁环锁紧固定。

#### 2. 照明，闪光，报警

手柄顶部推钮开关操作模式：开关一档，白光 LED 灯照明；第二档，白光 LED 照明+红光

LED 灯闪光警示；第三档，关；第四档，高分贝声音报警+红光 LED 灯闪光警示。

### 3. 收音机


- (1) 用手指轻按手柄侧面中间收音机控制按钮，收音机即处于工作状态。此时用手指轻按收音机电台搜索左右按键，即可实现调频频率大小调节，以锁定中意的电台节目。
- (2) 用手指轻按收音机上下音量控制按键，即可调节声音大小，以适合的音量大小进行节目收听；

### 4. 充电

- (1) 将充电线一端插入产品 DC 口，另一端接入标准 5V 输出 USB 母座即可对产品内部充电电池充电，此时充电红色指示灯亮，充满电后指示灯熄灭。

### 注意事项

1. 照明时切勿将灯光对准眼睛照射，以免强光对视力造成伤害；
2. 请勿将产品放置在高温，高湿，或多尘的场所，切忌在水中浸泡；
3. 当老年人出现跌倒或其他紧急情况需要救助时，请将开关拨到声音报警档，以提醒过往路人进行援助。其他时间不建议使用声音报警档位，以免高分贝声音对老人，幼儿产生惊吓。
4. 尽量避免拐杖跌倒或重击，以免损坏内部的电子元件或塑胶零件，对产品使用产生影响；

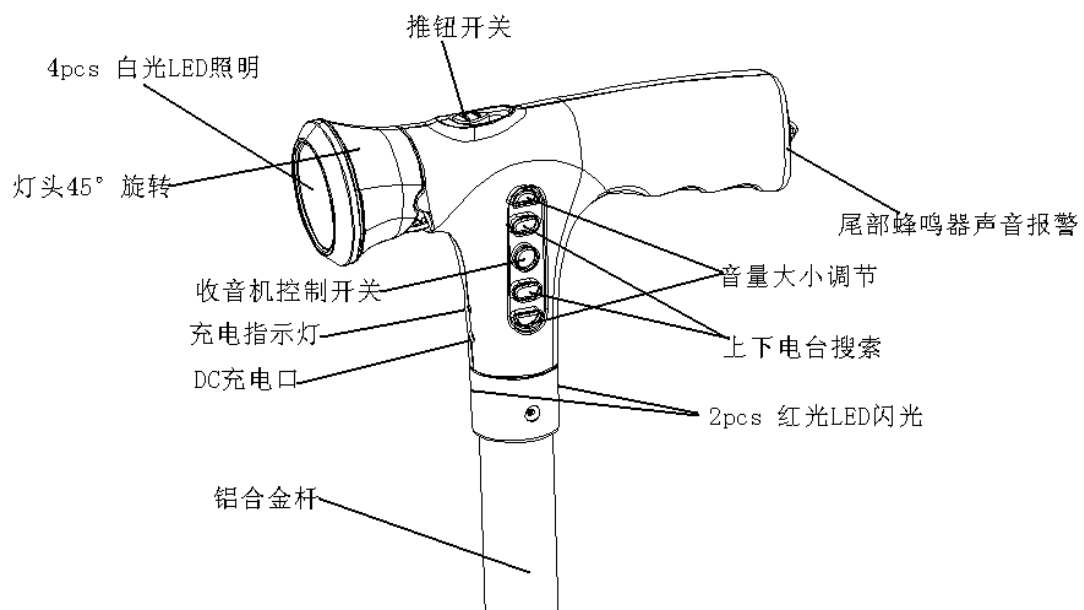

制造商：东莞市光特康复器材有限公司

地址：东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路1号

全国服务热线：400-1393-168

